


# Инструкция по использованию индукционной системы VERT-1 MP3

Портативная индукционная система VERT-1 MP3 — это переносное устройство, передающее информацию гражданам со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами, его необходимо устанавливать в местах предоставления услуг населению согласно п. 8.1.10 СП 59.13330. Благодаря усилению звука изделие помогает людям с ограничениями по слуху получать необходимую информацию без внешних помех.

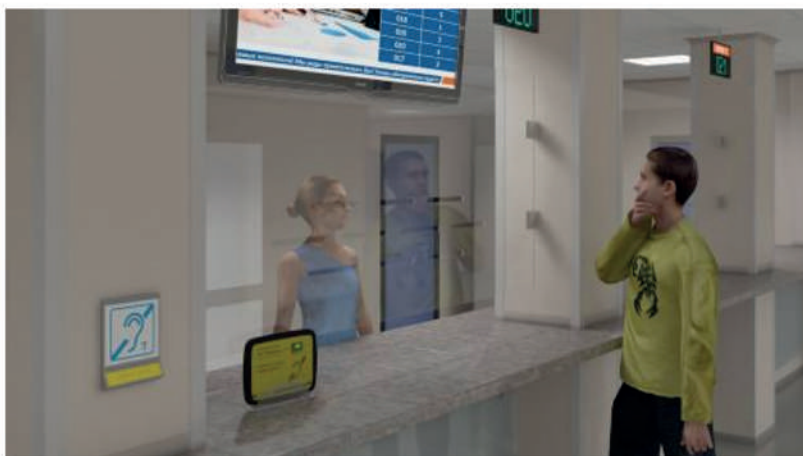

Данная модель индукционного оборудования VERT-1 MP3 имеет ряд дополнительных функций, связанных со встроенным аудио модулем.

## Из чего состоит индукционная система?

Индукционная система VERT-1 MP3 представляет собой небольшое пластиковое устройство размерами 23 x 32 x 3,5 см со встроенной петлей и двумя панелями управления.

### На передней панели управления расположены:

- Модуль воспроизведения звука (MP3)
- Слот под micro-SD флэш-карту
- Гнездо USB
- Гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX)
- Кнопка уменьшения громкости / переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты
- Кнопка воспроизведения / паузы
- Кнопка увеличения громкости / переход на следующий трек / выбор радиочастоты
- Кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3)
- Информационный дисплей



На передней панели управления расположены:



- Кнопка включения системы
- Кнопка выключения системы
- Индикатор активности работы
- Индикатор включения питания
- Гнездо под внешний микрофон
- Гнездо для подключения зарядного устройства
- Переключатель режима работы: модуль MP3 / микрофон (контур)
- Встроенный микрофон
- Переключатель режима работы микрофона: встроенный микрофон / внешний микрофон



Также в комплект индукционной петли VERT-1 MP3 входит: блок питания 220 V, сборная подставка для устройства, пиктограмма доступности помещения и паспорт изделия.

### Характеристики

Система VERT-1 MP3 имеет встроенный микрофон с чувствительностью от -60 до -3 дБ, достаточно компактна и не занимает много места на рабочем столе. Для удалённого вещания в специальный разъём также можно подключить выносной микрофон.

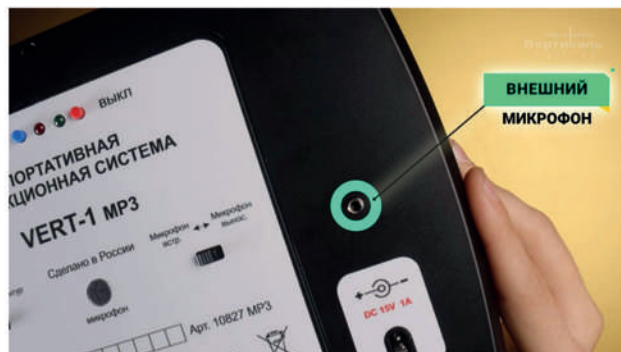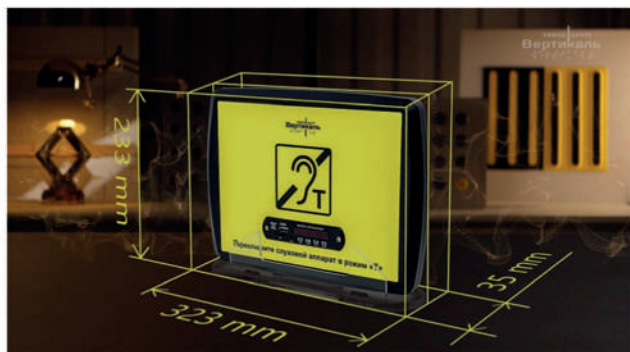


Устройство передаёт голос чётко и громко, а заряда аккумулятора хватает на 4 часа автономной работы. Площадь покрытия индукционного поля — 1,2 кв. м. Это хорошие показатели для малогабаритной индукционной системы, поэтому изделие подходит для установки и интенсивного использования в любой зоне получения услуг.

Главное преимущество Vert-1 MP3 состоит в том, что благодаря MP3 модулю можно транслировать сообщения с девайсов через Bluetooth или AUX вход. А также с помощью USB накопителя через систему можно передавать заранее записанные аудио файлы.

### Сборка и настройка

Индукционная система VERT-1 MP3 поставляется в собранном виде, из составных частей необходимо собрать только подставку и поместить в неё изделие. Затем, подключив кабель питания, нажать кнопку включения системы, находящуюся на задней панели управления.



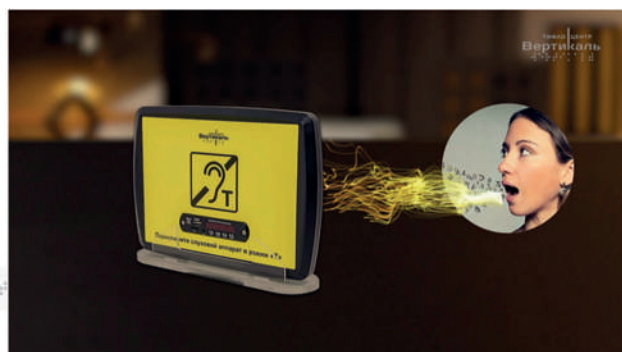

Далее необходимо выбрать режим приёма голоса между встраиваемым и выносным микрофоном. Потом следует выбрать режим работы устройства «Контур» для работы в обычном режиме, а при необходимости приёма информации со сторонних устройств — выбрать режим «MP3».

### Как пользоваться индукционной системой?

При непосредственном использовании портативной системы Vert-1 MP3 нужно повернуть изделие лицевой стороной к собеседнику и включить. Горящий зелёный индикатор информирует о работоспособности системы.

В режиме «Контур» следует говорить в сторону микрофона на обратной стороне системы или в выносной микрофон. В режиме «MP3», нажимая кнопку «MODE», нужно выбрать один из вариантов приёма аудиосообщения.



«AUX» принимает звук с любого устройства через соответствующий разъём. «Bluetooth» принимает звук через телефон и подобные устройства с подключением к аудио модулю. Режим воспроизведения аудиозаписей с USB накопителя включается автоматически при подключении к соответствующему разъёму.

Во всех режимах работы, зажимая кнопки «вперёд» или «назад», можно увеличивать или уменьшать громкость звука.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

**www.ТифлоЦентр.рф**

**8 800 555-34-73**

Инструкция по использованию индукционной системы VERT-1 MP3

